

Xpert® Breast Cancer STRAT4 PROCEDIMENTO DE REPETIÇÃO DO TESTE

para resultados Indeterminados (Indeterminate) ou Inválidos (Invalid) — Preparação do lisado de FFPE concentrado

Consulte as instruções detalhadas, precauções e advertências no folheto informativo.


Para obter uma cópia da FDS, visite www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Assistência Técnica da Cepheid
Filial nos EUA
(888) 838-3222, opção 2
techsupport@cepheid.com


Delegação na Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




- 1 Raspe uma secção de tecido ou efetue uma macrodissecção da lâmina.

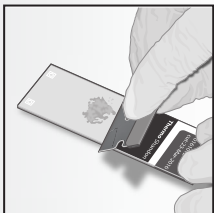


- 2 Transfira o tecido para o tubo de 1,5 mL fornecido.

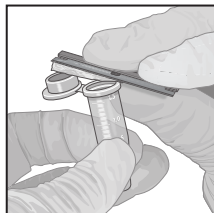

- 3 Adicione 260 µL de reagente de lise FFPE ao tubo de 1,5 mL que contém o tecido FFPE.

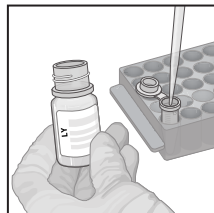

- 4 Adicione 5 µL de proteinase K (PK) ao mesmo tubo de 1,5 mL. Feche a tampa.

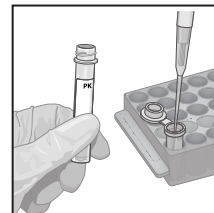


- 5 Agite em vórtex numa definição máxima durante 5 segundos.



- 6 Microcentrifugue brevemente o tubo para remover o líquido da tampa.



- 7 Proceda à incubação da amostra a 80 °C durante 30 minutos.

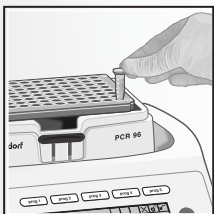


- 8 Agite em vórtex numa definição máxima durante 5 segundos.



- 9 Microcentrifugue brevemente o tubo para remover o líquido da tampa.



- 10 Adicione 260 µL de etanol ≥ 95% ao mesmo tubo de lise de 1,5 mL.

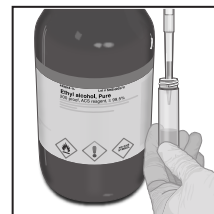

- 11 Feche a tampa e agite em vórtex a amostra numa definição máxima durante 15 segundos.



- 12 Microcentrifugue brevemente o tubo para remover o líquido da tampa.



NOTA: O lisado preparado, com etanol, é estável entre 2 °C e 8 °C, durante 1 semana, no máximo. E a ≤ -20 °C durante 4 semanas, no máximo.

Xpert® Breast Cancer STRAT4 PROCEDIMENTO DE REPETIÇÃO DO TESTE

para resultados Sem Resultado (No Result), Repetir teste (Repeat Test) ou Erro (Error)



Consulte as instruções detalhadas, precauções e advertências no folheto informativo.

Para obter uma cópia da FDS, visite www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Assistência Técnica da Cepheid
Filial nos EUA
(888) 838-3222, opção 2
techsupport@cepheid.com

Delegação na Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com


1 Obtenha um novo cartucho e o lisado de FFPE guardado para cada amostra a ser novamente testada.




2 Agite em vórtex o lisado de FFPE durante 15 segundos.



3 Abra a tampa do cartucho Xpert.

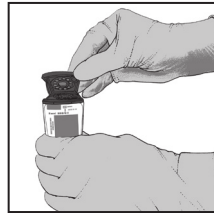

4 Pipete 520 µL do lisado guardado do frasco de 5 mL e transfira para a câmara da amostra.

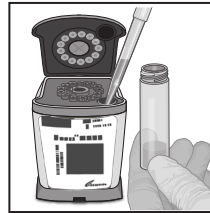

5 Feche a tampa do cartucho Xpert.



6 Inicie o ensaio dentro do prazo indicado no folheto informativo.

