


Recogida de muestras nasofaríngeas


1

Abra el paquete que contiene el hisopo y el tubo de medio de transporte. Deje el tubo a un lado antes de recoger la muestra.

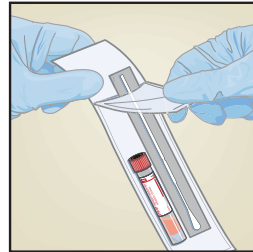


2

Abra el envoltorio del hisopo y retire el hisopo con cuidado de no tocar ninguna superficie con su punta.

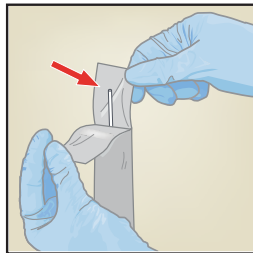

3


Sostenga el hisopo con la mano, pinzando la parte central del mango del hisopo encima de la línea ranurada.

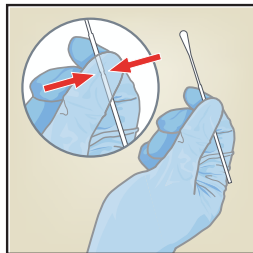

4


Introduzca con cuidado el hisopo en la fosa nasal hasta tocar la nasofaringe posterior.

Gire el hisopo varias veces.

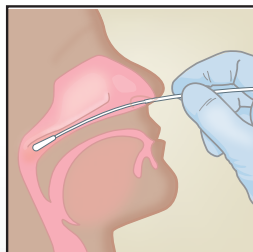

5


Quite la tapa del tubo. Introduzca el hisopo en el medio de transporte.

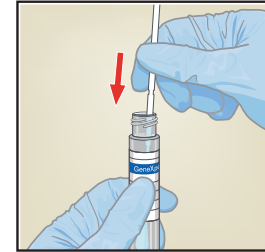

6

Rompa el mango del hisopo por la línea ranurada contra la pared del tubo.

Evite que el contenido salpique la piel. En caso de exposición, lave con agua y jabón.

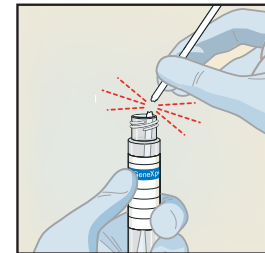

7

Vuelva a poner la tapa en el tubo y ciérrelo bien.

