



Colheita de amostras nasofaríngeas

Para utilização com o kit de colheita de amostras nasofaríngeas Xpert® — Referência SWAB/B-100


1 Abra a embalagem que contém a zaragatoa e o tubo de meio de transporte. Ponha o tubo de lado antes de colher a amostra.

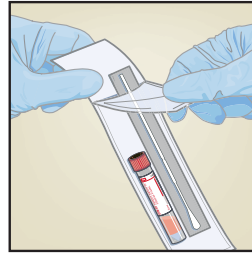


2 Abra o invólucro da zaragatoa e retire a zaragatoa, tendo cuidado para não tocar com a ponta da zaragatoa em qualquer superfície.

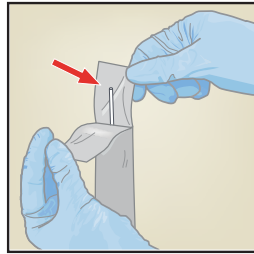

3 Segure a zaragatoa na sua mão, colocando o polegar e o dedo indicador na parte média da haste da zaragatoa sobre a linha perforada.

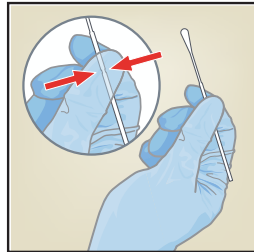


4 Insira cuidadosamente a zaragatoa dentro da narina até tocar na nasofaringe posterior.

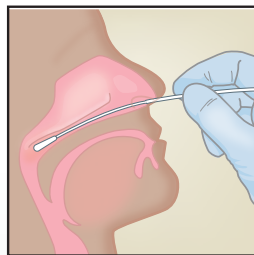


Rode várias vezes a zaragatoa.

5 Retire a tampa do tubo. Introduza a zaragatoa no meio de transporte.

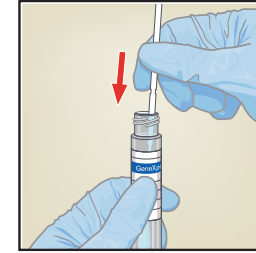

6 Parta a haste da zaragatoa contra a parte lateral do tubo na linha perforada. Evite que o conteúdo salpique a pele. Em caso de exposição, lave com água e sabão.

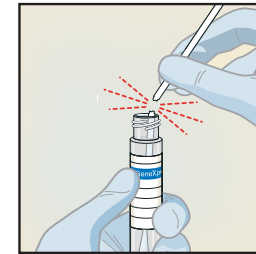

7 Volte a colocar a tampa no tubo e aperte-a bem.

