


Xpert® HPV v2 Kartuschenvorbereitung

Ausführliche Anweisungen, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Gebrauchsanweisung zu entnehmen.

1

Eine korrekt entnommene und gekennzeichnete Testprobe beschaffen.

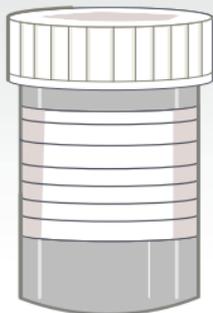

2

Eine Xpert HPV v2 Kartusche und Transferpipette (mitgeliefert) beschaffen. Die Linie auf der Pipette zeigt das Füllvolumen von 1 ml an. Die Kartusche mit der Probenidentifikation beschriften.



3

Die Testkartusche auf Beschädigungen überprüfen. Falls sie beschädigt ist, darf sie nicht verwendet werden. Den Kartuschendeckel öffnen.



4

Die Probe vermischen, indem das Probenfläschchen 8 bis 10 Mal vorsichtig umgedreht wird. Alternativ kann es kurz im Vortex gemischt werden (5 Sekunden kontinuierlich bei halber Geschwindigkeit).



5

Die Transferpipette aus der Verpackung entnehmen. Den Deckel des Probenfläschchens öffnen, den Ballon der Transferpipette zusammendrücken, die Pipette in das Fläschchen einführen und den Ballon loslassen, so dass sich die Transferpipette bis zur 1-ml-Linie füllt. Sicherstellen, dass sich in der gefüllten Pipette keine Blasen befinden.



6

Den Inhalt der Pipette in die Probenkammer der Kartusche exprimieren. Vermeiden Sie die Zugabe von überschüssigem Schleim in die Kartusche.



7

Den Kartuschendeckel schließen und den Test innerhalb des in der Gebrauchsanweisung angegebenen Zeitrahmens starten.

