

Przygotowanie kartridża Xpert® Xpress Flu and Flu/RSV Cartridge

- Xpert® Xpress Flu/RSV

Kopia karty charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS, Safety Data Sheet) jest dostępna na stronie www.cepheid.com lub www.cepheidinternational.com
Centrum wsparcia klienta firmy Cepheid
Oddział w USA
(888) 838-3222, opcja nr 2

techsupport@cepheid.com
Oddział w Europie
+33563825319
support@cepheideurope.com



Szczegółowe instrukcje, środki ostrożności i ostrzeżenia zamieszczono w ulotce informacyjnej.


- 1 Dla każdej próbki potrzebny jest jeden kartridż Xpert.



- 2 Odwrócić probówkę 5 razy.



- 3 Otworzyć wieczko kartridża.

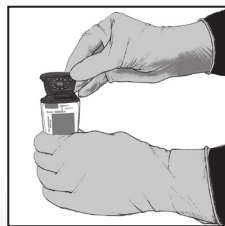

- 4 Używając czystej pipety o pojemności 300 µl (dostarczonej), przenieść 300 µl (jedno zaciągnięcie) próbki do otworu kartridża.



- 5 Zamknąć wieczko kartridża.



- 6 Rozpocząć test w czasie określonym w ulotce informacyjnej.