

Präparation der Xpert EV-Kartusche

Ausführliche Anleitung, Vorsichtsmaßnahmen und Warnhinweise sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblatts ist erhältlich unter www.cepheid.com oder www.cepheidinternational.com

Technischer Kundendienst von Cepheid

Büro USA
(888) 838-3222, Option 2
techsupport@cepheid.com


Büro Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Für jede Probe eine Kartusche, drei Ampullen und ein Fläschchen bereitstellen.




2 Den Kartuschendeckel öffnen.

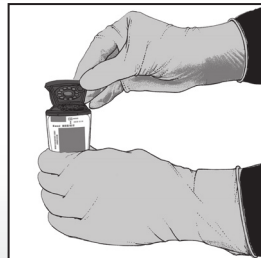

3 Die Ampullen öffnen und anschließend Ampulle 1 in Öffnung 1, Ampulle 2 in Öffnung 2 und Ampulle 3 in Öffnung 3 geben.

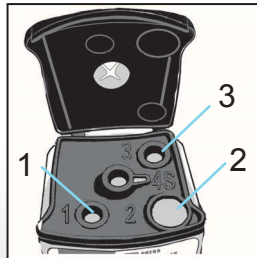

4 140 µl des Lysereagens in Kammer 4S pipettieren und anschließend 140 µl der Probe in Kammer 4S pipettieren.

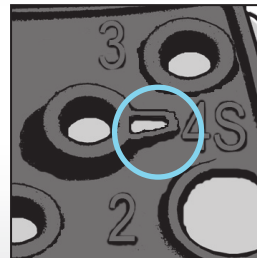

5 Den Kartuschendeckel schließen.



6 Den Test innerhalb des in der Packungsbeilage angegebenen Zeitrahmens starten.