



<b>Kit de reactivo de prueba</b>	Xpert Bladder Cancer Detection		
<b>Número de catálogo</b>	GXBLAD-CD-CE-10		
<b>Tecnología</b>	RT-PCR en tiempo real		
<b>Dianas</b>	Cinco dianas de ARNm (UPK1B, IGF2, CRH, ANXA10, ABL1)		
<b>Lote o a demanda</b>	A demanda		
<b>Tamaño de lote mínimo</b>	1		
<b>Tipos de muestra</b>	Orina evacuada (no la primera micción de la mañana)		
<b>Extracción de muestras</b>	Automática/integrada		
<b>Tiempo de respuesta</b>	Aproximadamente 90 minutos		
<b>Controles: Control de adecuación de la muestra</b>	ABL1		
<b>Controles: Detección/funcionamiento de la sonda</b>	Control de comprobación de la sonda		
<b>Controles: Control interno</b>	Armored RNA®		
<b>Eficacia diagnóstica de la prueba Xpert Bladder Cancer Detection frente a la cistoscopia/histología</b>			
<i>(N=895 sujetos del estudio)</i>	<b>Global</b>	<b>Grado bajo</b>	<b>Grado alto</b>
<b>Sensibilidad</b>	75,8 %	52,2 %	88,4 %
<b>Especificidad</b>	84,6 %	N/A	N/A
<b>Valor predictivo negativo</b>	97,8 %		
<b>Valor predictivo positivo</b>	28,1 %		
<b>Conservación y estabilidad de la muestra</b>	Las muestras de orina contenidas en los tubos de reactivo de transporte de orina Xpert se mantendrán estables hasta 7 días a 2–28 °C		
<b>Conservación del kit</b>	2–28 °C		
<b>Materiales adicionales requeridos</b>	Kit de reactivo de transporte de orina Xpert <b>Número de catálogo:</b> GXUTR-CE-30		
<b>Controles comerciales</b>	Disponibles a través de terceros Para más información contacte con el Servicio Técnico (email: <a href="mailto:techsupport@cepheid.com">techsupport@cepheid.com</a> )		

CE-IVD. Producto sanitario para diagnóstico *in vitro*. No disponible en todos los países. No disponible en Estados Unidos.

#### SEDE CENTRAL CORPORATIVA

904 Caribbean Drive  
Sunnyvale, CA 94089 EE. UU.

LLAMADA GRATUITA (desde EE. UU.) +1.888.336.2743  
TELÉFONO +1.408.541.4191  
FAX +1.408.541.4192

#### SEDE CENTRAL EUROPEA

Vira Soleih  
81470 Maurens-Scopont, Francia

TELÉFONO +33.563.82.53.00  
FAX +33.563.82.53.01  
CORREO ELECTRÓNICO [cepheid@cepheideurope.fr](mailto:cepheid@cepheideurope.fr)

[www.Cepheidinternational.com](http://www.Cepheidinternational.com)