

Vorbereitung der Xpert® HPV-Kartusche

**Ausführliche Anleitung,
Vorsichtsmaßnahmen und
Warnhinweise sind der
Packungsbeilage zu entnehmen.**

Ein Exemplar des Sicherheitsdatenblattes ist
unter www.cepheidinternational.com erhältlich


Technischer Kundendienst von Cepheid

Büro USA
(888) 838-3222
techsupport@cepheid.com

Büro Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



1 Eine korrekt
entnommene und
gekennzeichnete
zervikale Probe
beschaffen.

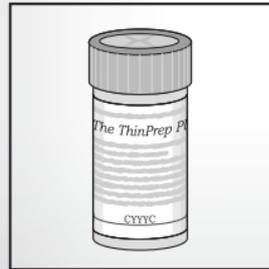


2 Eine Xpert HPV-
Kartusche und
Transferpipette
(mitgeliefert)
beschaffen.




3 Den Xpert
Kartuschendeckel
öffnen.



4 Das Probenfläschchen
8-10 Mal vorsichtig
umdrehen. Alternativ
kann es kurz im Vortex
gemischt werden (ca.
5 Sekunden bei halber
Geschwindigkeit).

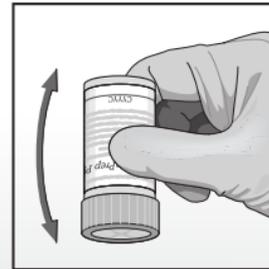

5 Die Transferpipette
bis zur Linie (1 mL)
mit der Probe füllen.

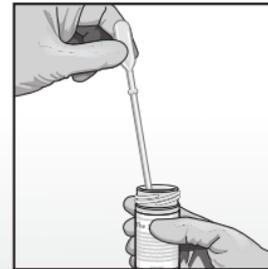

6 Die Transferpipette
in die Probenkammer
entleeren.



7 Den Xpert
Kartuschendeckel
schließen.



8 Die Kartusche
einsetzen und den
Assay starten.

