



# Nasal penselprøvetaking


1 ..... Åpne pakken som inneholder prøvetakingspensel og transportmedierøret. Sett prøverøret til side før du tar prøven.

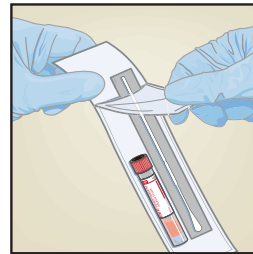

2 ..... Åpne innpakningen til prøvetakingspenselen og ta ut prøvetakingspenselen. Pass på at tuppen på penselen ikke berører noen overflate.

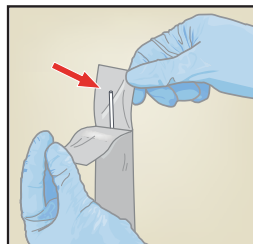

3 ..... Hold prøvetakingspenselen i hånden og klem i midten av prøvetakingspenselen på delelinjen.

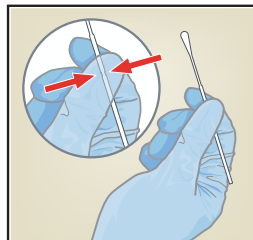


4 ..... Roter prøvetakingspenselen mot innsiden av neseboret i 3 sekunder mens du presser en finger mot utsiden av neseboret.




Ikke før prøvetakingspenselen mer enn 1–1,5 cm inn.


5 ..... Gjenta trinn 4 i det andre neseboret med den samme prøvetakingspenselen. For å unngå prøvekontaminasjon skal tuppen på prøvetakingspenselen ikke berøre noe etter at prøven er tatt.

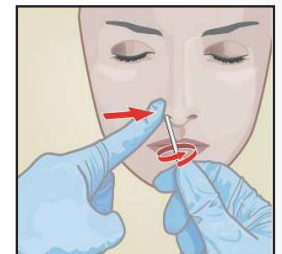

6 ..... Skru korken av prøverøret. Sett prøvetakingspenselen inn i transportmediet.

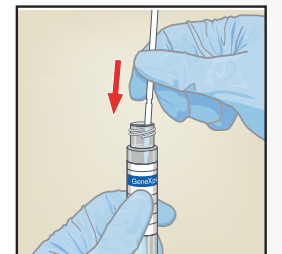

7 ..... Brekk av prøvetakingspenselen mot siden av prøverøret ved delelinjen. Unngå søl av innholdet på huden. Vask med såpe og vann ved eksponering.

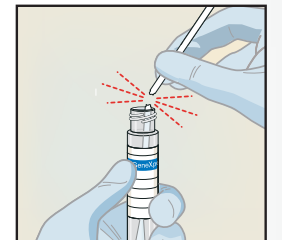

8 ..... Skru korken på prøverøret og lukk godt.

