


Recogida de muestras de hisopos nasales


1

Abra el paquete que contiene el hisopo y el tubo de medio de transporte. Deje el tubo a un lado antes de recoger la muestra.

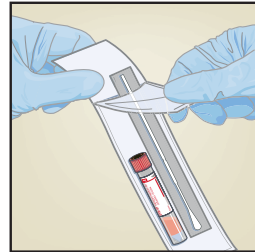


2

Abra el envoltorio del hisopo y retire el hisopo con cuidado de no tocar ninguna superficie con su punta.

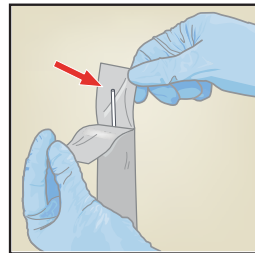

3

Sostenga el hisopo con la mano, pinzando la parte central del mango del hisopo encima de la línea ranurada.

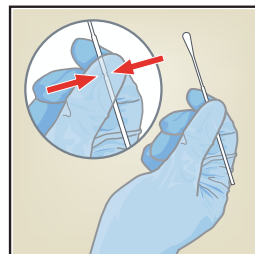

4

Haga girar el hisopo en contacto con el interior de la fosa nasal durante 3 segundos, al mismo tiempo que aplica presión con un dedo en el exterior de la fosa nasal.


No inserte los hisopos más de 1-1,5 cm.



5


Repita el paso 4 en la segunda fosa nasal con el mismo hisopo.

Para evitar la contaminación de la muestra, no toque nada con la punta del hisopo después de recoger la muestra.

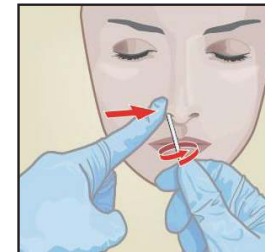

6


Quite la tapa del tubo. Introduzca el hisopo en el medio de transporte.

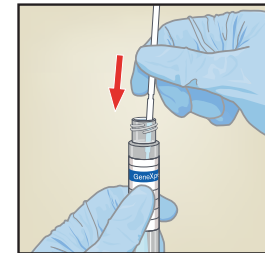

7

Rompa el mango del hisopo contra un lado del tubo por la línea ranurada.

Evite que el contenido salpique la piel. En caso de exposición, lave con agua y jabón.

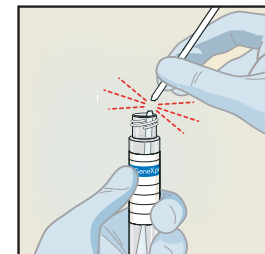

8

Vuelva a poner la tapa en el tubo y ciérrelo bien.

