

Preparación del cartucho Xpert® Ebola *mostrando la muestra de hisopo bucal*


Consulte el prospecto, donde encontrará instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.

Para obtener una copia de la hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS), visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com


Servicio técnico de Cepheid
Oficina en EE.UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cepheid.com

Oficina de Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com

Frote la punta del hisopo* por la cara interior de la mejilla con movimientos firmes y circulares. Utilice ambas mejillas, si es posible, y toda la cabeza del hisopo.

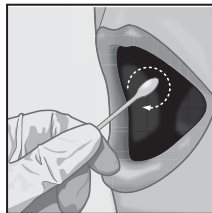

Alinee la pequeña ranura del hisopo con el borde del frasco de reactivo para muestras y parta el hisopo doblándolo hacia un lado. Utilice una gasa para evitar salpicaduras.

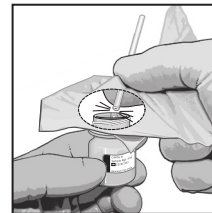


**Cepheid**®
A better way.

1 Tome un cartucho Xpert Ebola y la muestra debidamente obtenida y etiquetada.




2 Con la tapa del frasco de reactivo para muestras cerrada, mezcle la muestra en un vórtex durante 10 segundos.

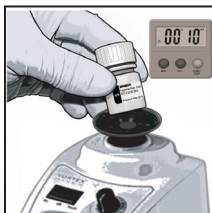


3 Incube la muestra a temperatura ambiente durante 20 minutos.



4 Abra el cartucho.

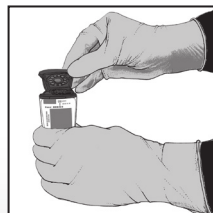

5 Utilizando la pipeta incluida, aspire 1 ml de la muestra tratada con reactivo para muestras.

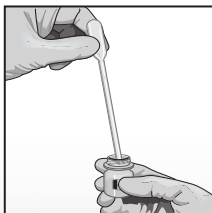

6 Vacíe el contenido de la pipeta en la cámara de muestras.



7 Cierre la tapa del cartucho Xpert.



8 Comience la prueba en los 30 minutos siguientes.

Preparación del cartucho Xpert® Ebola *mostrando la muestra de punción dactilar*

Consulte el prospecto, donde encontrará instrucciones, precauciones y advertencias detalladas.

Para obtener una copia de la hoja de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS), visite www.cepheid.com o www.cepheidinternational.com


Servicio técnico de Cepheid

Oficina en EE.UU.
(888) 838-3222, opción 2
techsupport@cepheid.com


Oficina de Europa
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



Deje que la cabeza del hisopo* absorba sangre al menos hasta llegar a 2/3. Transfiera de inmediato el hisopo al frasco de reactivo para muestras.

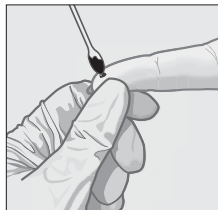

Alinee la pequeña ranura del hisopo con el borde del frasco de reactivo para muestras y parta el hisopo doblándolo hacia un lado. Utilice una gasa para evitar salpicaduras.

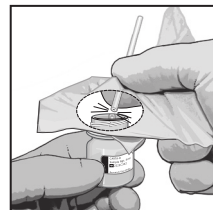

**Cepheid**®
A better way.

- 1 Tome un cartucho Xpert Ebola y la muestra debidamente obtenida y etiquetada.
- 2 Con la tapa del frasco de reactivo para muestras cerrada, mezcle la muestra en un vórtex durante 10 segundos.
- 3 Incube la muestra a temperatura ambiente durante 20 minutos.
- 4 Abra el cartucho.
- 5 Utilizando la pipeta incluida, aspire 1 ml de la muestra tratada con reactivo para muestras.
- 6 Vacíe el contenido de la pipeta en la cámara de muestras.
- 7 Cierre la tapa del cartucho Xpert.
- 8 Comience la prueba en los 30 minutos siguientes.

