



Colheita de amostra retal em zaragatoa colhida pelo médico para utilização com o kit de colheita de amostra em zaragatoa Xpert® – Referência SWAB/G-50


1
Lave as mãos antes de começar. Abra a embalagem de colheita **A** individual que contém o tubo de reagente para transporte de zaragatoas Xpert com tampa cor-de-rosa e a zaragatoa de colheita embalada individualmente. Ponha o tubo de lado antes de começar a colher a amostra. Elimine a zaragatoa maior **B**.

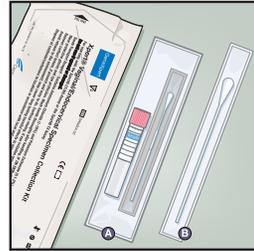


5
 Enquanto mantém a zaragatoa na mesma mão, desaperte a tampa do tubo de reagente para transporte de zaragatoa Xpert. Não entorne o conteúdo do tubo. Se o conteúdo do tubo se entornar, utilize um novo kit de colheita. Coloque imediatamente a zaragatoa de colheita no tubo de reagente para transporte.
ATENÇÃO: Se o conteúdo do tubo for entornado na sua pele, lave a área afetada com sabão e água. Se o conteúdo do tubo for salpicado para os seus olhos, lave imediatamente os olhos com água.

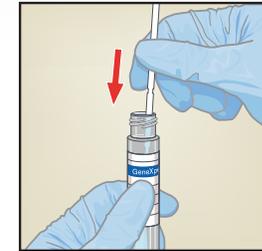


2
Abra o invólucro da zaragatoa de colheita, destacando a parte superior do invólucro. Retire a zaragatoa, tendo cuidado para não tocar na ponta nem pousar a zaragatoa.
Se tocar na ponta macia, pousar ou deixar cair a zaragatoa, utilize um novo kit de colheita.

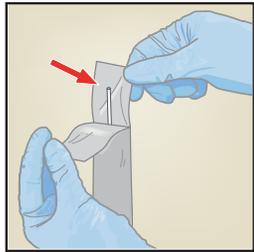


6
Identifique a linha perfurada na haste da zaragatoa de colheita, parta cuidadosamente a haste da zaragatoa contra a parte lateral do tubo na linha perfurada e elimine a parte superior da haste da zaragatoa. Se for necessário, rode suavemente a haste da zaragatoa para partir completamente. Evite que pingue sobre a pele. Em caso de exposição, lave com água e sabão.

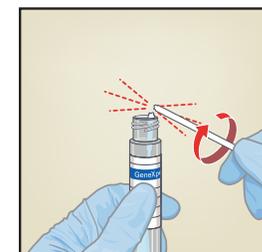


3
Segure a zaragatoa na sua mão, colocando o polegar e o dedo indicador na parte média da haste da zaragatoa sobre a linha perfurada.

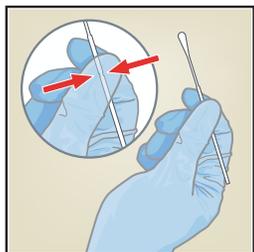

7
Volte a tapar o tubo para transporte e aperte bem a tampa.

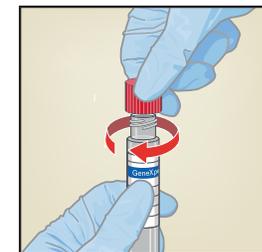

4
Insira cuidadosamente a zaragatoa aproximadamente 1 cm para além do esfíncter anal (de modo a que as pontas da fibra deixem de ser observadas) e rode suavemente.

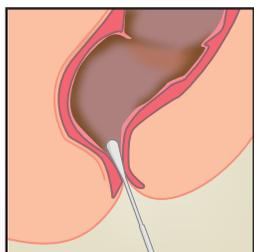


8
Inverta ou agite suavemente o tubo 3 a 4 vezes para eluir o material a partir da zaragatoa. Evite a formação de espuma. Rotule o tubo para transporte com informações de identificação da amostra, incluindo a data de colheita, conforme necessário.
A amostra deve ser transportada a uma temperatura entre 2 °C e 30 °C.
Antes de testar, a amostra pode ser conservada a uma temperatura entre 2 °C e 30 °C durante 60 dias.

Colheita de amostra faríngea em zaragatoa colhida pelo médico para utilização com o kit de colheita de amostra em zaragatoa Xpert® – Referência SWAB/G-50

1


Lave as mãos antes de começar. Abra a embalagem de colheita **A** individual que contém o tubo de reagente para transporte de zaragatoas Xpert com tampa cor-de-rosa e a zaragatoa de colheita embalada individualmente. Ponha o tubo de lado antes de começar a colher a amostra. Elimine a zaragatoa maior **B**.

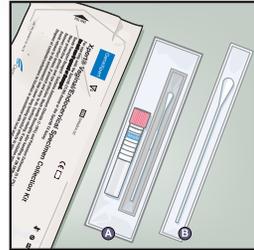

2


Abra o invólucro da zaragatoa de colheita, destacando a parte superior do invólucro. Retire a zaragatoa, tendo cuidado para não tocar na ponta nem pousar a zaragatoa.

Se tocar na ponta macia, pousar ou deixar cair a zaragatoa, utilize um novo kit de colheita.

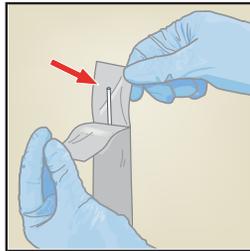


3

Segure a zaragatoa na sua mão, colocando o polegar e o dedo indicador na parte média da haste da zaragatoa sobre a linha perfurada.

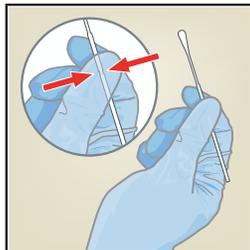

4

Solicite ao paciente para abrir bem a boca. Coloque a língua no fundo da boca. Passe com a zaragatoa nas áreas da faringe (amígdalas, parede posterior e úvula).

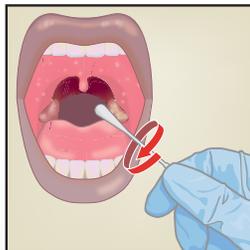


5




Enquanto mantém a zaragatoa na mesma mão, desaperte a tampa do tubo de reagente para transporte de zaragatoa Xpert. Não entorne o conteúdo do tubo. Se o conteúdo do tubo se entornar, utilize um novo kit de colheita. Coloque imediatamente a zaragatoa de colheita no tubo de reagente para transporte.

ATENÇÃO: Se o conteúdo do tubo for entornado na sua pele, lave a área afetada com sabão e água. Se o conteúdo do tubo for salpicado para os seus olhos, lave imediatamente os olhos com água.

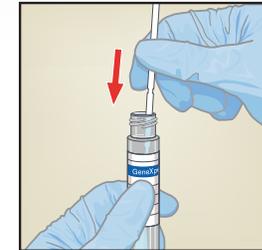


6

Identifique a linha perfurada na haste da zaragatoa de colheita, parta cuidadosamente a haste da zaragatoa contra a parte lateral do tubo na linha perfurada e elimine a parte superior da haste da zaragatoa. Se for necessário, rode suavemente a haste da zaragatoa para partir completamente. Evite que pingue sobre a pele. Em caso de exposição, lave com água e sabão.

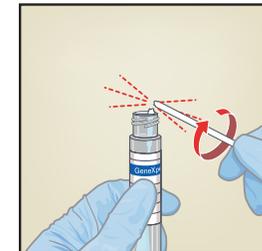

7

Volte a tapar o tubo para transporte e aperte bem a tampa.

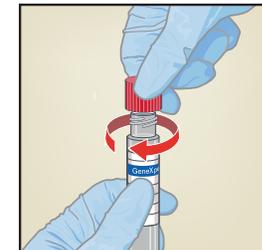

8

Inverta ou agite suavemente o tubo 3 a 4 vezes para eluir o material a partir da zaragatoa. Evite a formação de espuma. Rotule o tubo para transporte com informações de identificação da amostra, incluindo a data de colheita, conforme necessário.

A amostra deve ser transportada a uma temperatura entre 2 °C e 30 °C.

Antes de testar, a amostra pode ser conservada a uma temperatura entre 2 °C e 30 °C durante 60 dias.