




1
 Aprire la confezione singola (A) contenente la provetta con il reagente per trasporto del tampone Xpert® con il tappo rosa e il tampone di prelievo in confezione singola. Mettere da parte la provetta prima di iniziare il prelievo del campione.
 Gettare il tampone più grande (B).

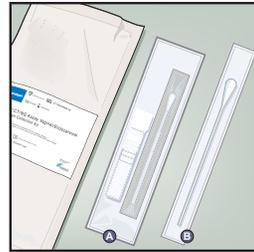


2
 Aprire la confezione del tampone di prelievo staccando i lembi superiori della busta.
 Estrarre il tampone, prestando attenzione a non toccare la punta ed evitando di appoggiarlo su una qualsiasi superficie.

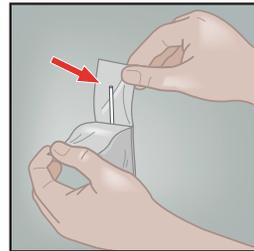


3
 Tenere il tampone in mano con il pollice e l'indice al centro dello stelo in corrispondenza della linea perforata.

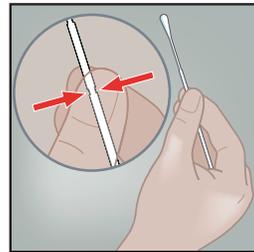


4
 Introdurre con cautela il tampone in vagina per circa 5 cm all'interno dell'apertura della vagina.

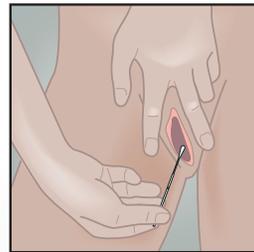


5
 Ruotare delicatamente il tampone per 10-30 secondi. Assicurarsi che il tampone tocchi le pareti della vagina in modo da assorbire l'umidità.
 Ritirare il tampone e continuare a tenerlo in mano.

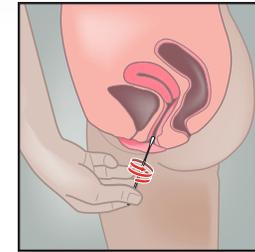


6
 Stappare la provetta di trasporto. Collocare immediatamente il tampone di prelievo nella provetta di trasporto.

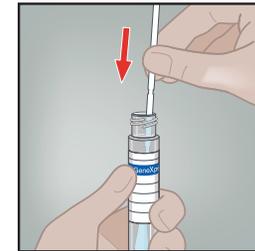

7
 Una volta identificata la linea perforata, spezzare lo stelo del tampone contro il lato della provetta. Gettare la parte superiore dello stelo della provetta.
 Evitare di schizzare il contenuto sulla pelle. Se il contenuto dovesse venire a contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone.

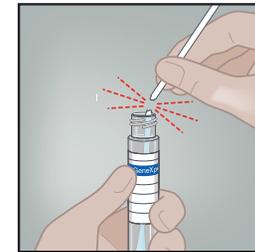

8
 Richiudere con il tappo la provetta di trasporto e serrarlo saldamente.
 Restituire la provetta secondo le istruzioni fornite dal medico, dall'infermiera o dal fornitore dell'assistenza sanitaria.

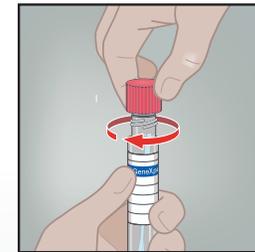

Nota - Il fornitore dell'assistenza sanitaria deve applicare sulla provetta di trasporto l'etichetta con le informazioni di identificazione del campione, includendo la data del prelievo, secondo necessità.