


Colheita de amostra retal/perirretal


1

Utilize o dispositivo de colheita de amostras n.º 900-0370 para colher a amostra.

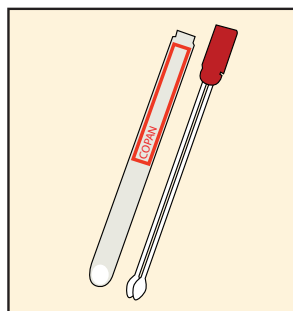


3

Coloque o par de zaragatoas novamente no tubo de transporte.

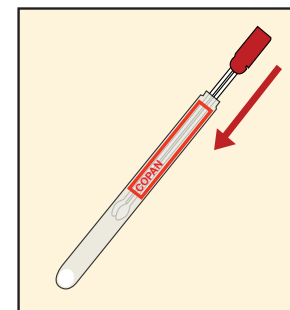

Amostra de zaragatoa retal

Insira cuidadosamente ambas as pontas da zaragatoa aproximadamente 1 cm para além do esfíncter anal e rode suavemente.

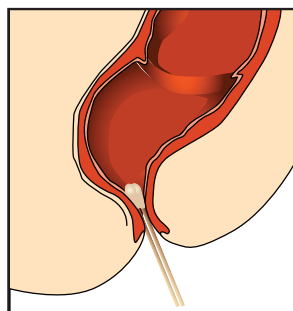


2

OU

Amostra de zaragatoa perirretal

insira cuidadosamente ambas as pontas da zaragatoa não mais de 1 cm na abertura anal antes do esfíncter anal e rode suavemente.

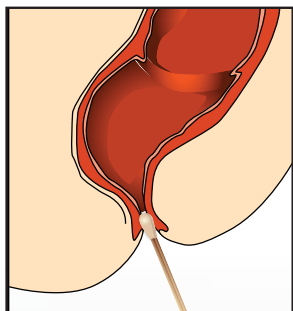

4

As zaragatoas dentro do tubo para transporte podem ser conservadas a uma temperatura entre 15 °C e 28 °C durante um máximo de cinco dias.

