


# Préparation de la cartouche Xpert® HPV v2

Consulter la notice d'utilisation pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

1

Obtenir un échantillon de test recueilli et étiqueté de manière appropriée.

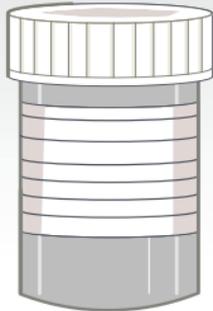


2

Se procurer une cartouche Xpert HPV v2 et une pipette de transfert (fournie). La ligne sur la pipette indique un volume de remplissage de 1 mL. Étiqueter la cartouche avec l'identification de l'échantillon.



3

Examiner la cartouche de test pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée. Si elle est endommagée, ne pas l'utiliser. Ouvrir le couvercle de la cartouche.

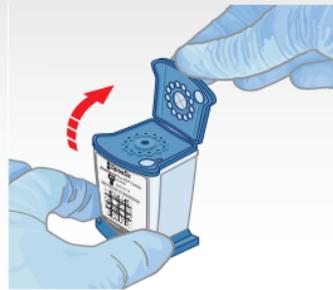

4

Mélanger l'échantillon en inversant doucement le flacon d'échantillon 8 à 10 fois ou en le vortexant brièvement dans un agitateur à vortex à vitesse intermédiaire, de façon continue pendant 5 secondes.



5

Ouvrir l'emballage de la pipette de transfert. Ouvrir le couvercle du flacon d'échantillon, comprimer la poire de la pipette dans le flacon, relâcher la poire pour remplir la pipette de transfert jusqu'à la ligne de 1 mL. Vérifier que la pipette est remplie et ne présente aucune bulle.



6

Vider le contenu de la pipette dans la chambre à échantillon de la cartouche. Éviter d'ajouter trop de mucus dans la cartouche.



7

Fermer le couvercle de la cartouche et démarrer le test dans le délai précisé dans la notice d'utilisation.

