


Entnahme von Nasenabstrichen


1

Die Verpackung mit dem Tupfer und dem Röhrchen mit Transportmedium öffnen. Das Röhrchen beiseite stellen, bevor die Probe entnommen wird.

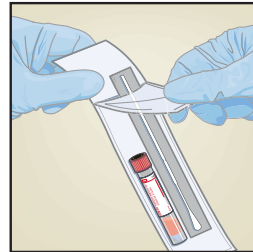


2

Die Verpackung des Tupfers öffnen und den Tupfer entnehmen. Dabei sorgfältig darauf achten, keine Oberflächen mit der Tupferspitze zu berühren.

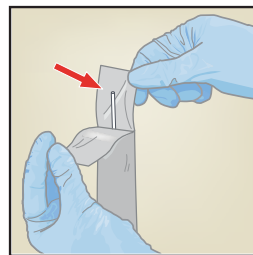

3

Den Tupfer in der Hand halten und fest auf die Sollbruchstelle in der Mitte des Tupferstiels drücken.

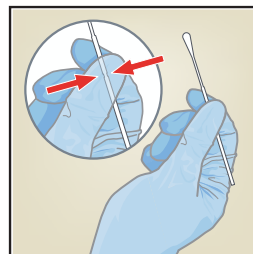

4

Den Tupfer 3 Sekunden lang gegen die Innenwand des Nasenlochs drehen und mit einem Finger gleichzeitig von außen gegen das Nasenloch drücken.




Die Tupfer nicht tiefer als 1 bis 1,5 cm einführen.

5


Schritt 4 mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch wiederholen.

Um eine Kontamination der Probe zu vermeiden, nach der Probenentnahme nichts mit der Tupferspitze berühren.

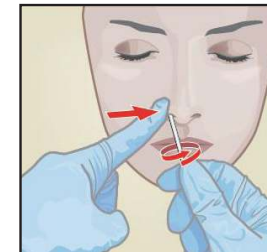

6


Den Deckel vom Röhrchen abnehmen. Den Tupfer in das Transportmedium stecken.

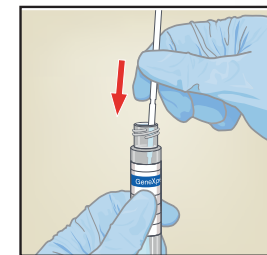

7

Den Stiel des Tupfers an der Sollbruchstelle gegen die Röhrchenwand abbrechen.

Verspritzen des Inhalts auf die Haut vermeiden. Bei Kontakt mit Wasser und Seife waschen.

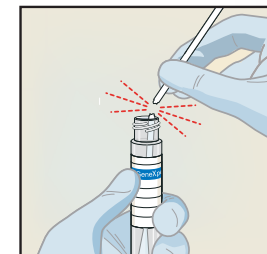

8

Den Deckel wieder auf das Röhrchen setzen und fest verschließen.

