

Préparation de la cartouche Xpert®

- Xpert Xpress SARS-CoV-2
- Xpert Xpress SARS-CoV-2/Flu/RSV
- Xpert Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*
- Xpert Xpress CoV-2 *plus*

Consulter la notice pour obtenir les instructions détaillées, les précautions et les avertissements.

Pour obtenir un exemplaire de la FDS, consulter le site www.cepheid.com ou www.cepheidinternational.com

Les coordonnées de tous les bureaux du service support technique de Cepheid sont disponibles sur notre site Internet à l'adresse suivante : www.cepheid.com/en/CustomerSupport.




1 Prendre une cartouche Xpert pour chaque échantillon.



2 Retourner rapidement le tube 5 fois.




3 Ouvrir le couvercle de la cartouche.

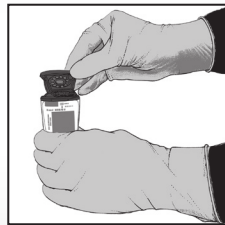

4 À l'aide d'une pipette propre de 300 µl (fournie), transférer 300 µl (une aspiration) de l'échantillon dans l'ouverture de la cartouche.



5 Fermer le couvercle de la cartouche.

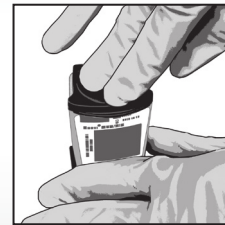

6 Démarrer le test dans le délai précisé dans la notice.