

Guida di avvio rapido per Xpert® HCV VL Fingerstick

Materiale necessario


- 1 Minivette POCT Sarstedt monouso viola (EDTA 100 µl)
- 1 lancetta di sicurezza 18 G, lama con profondità di 1,8 mm o 1,5 mm, Sarstedt o equivalente
- 1 salvietta disinfettante con alcool
- 1 garza sterile




- 1
- Indossare i guanti.
 - Selezionare il sito di puntura sul polpastrello della mano non dominante (aree appropriate ombreggiate in blu).
 - Se necessario, favorire il flusso di sangue nel sito di puntura riscaldando l'area.




- 2
- Disinfettare il sito di puntura e lasciare asciugare all'aria.
 - Ruotare il cappuccio di protezione della lancetta (1/4 di giro) ed estrarlo.

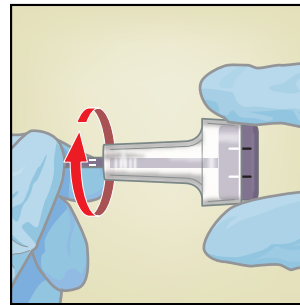


- 3
- Appoggiare la mano del paziente su una superficie stabile.
 - Pungere il polpastrello.
 - Smaltire la lancetta di sicurezza in un contenitore dei rifiuti idoneo.

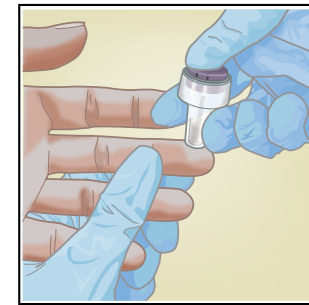


- 4
- Rimuovere la prima goccia di sangue con una garza sterile.

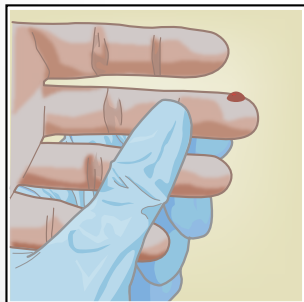

- 5
- Raccogliere il sangue utilizzando il Minivette POCT.
 - **NON:**
 - Coprire il foro di ventilazione.
 - Tenere il Minivette POCT in posizione verticale.

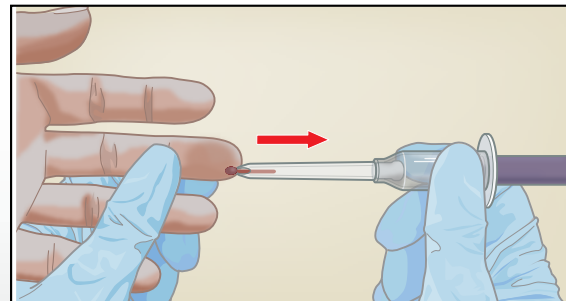


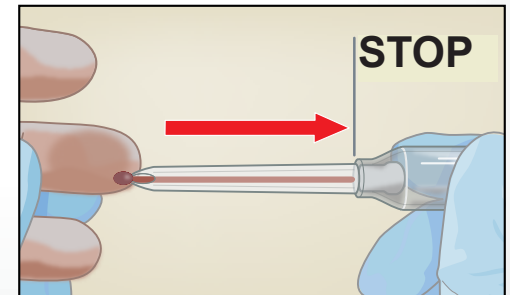



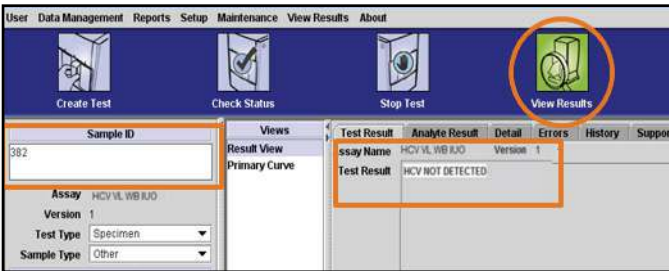

- 6
- La raccolta di sangue è completa quando il sangue raggiunge il filtro bianco.



Guida di avvio rapido per Xpert® HCV VL Fingerstick

- 1 Per ogni campione prendere una cartuccia. 
- 2 Aprire il coperchio della cartuccia. 
- 3 Collocare completamente la punta del capillare nella camera del campione della cartuccia e premere leggermente verso il basso il pistone per erogare il campione di sangue intero. Smaltire il Minivette POCT. 
- 4 Chiudere bene il coperchio. 

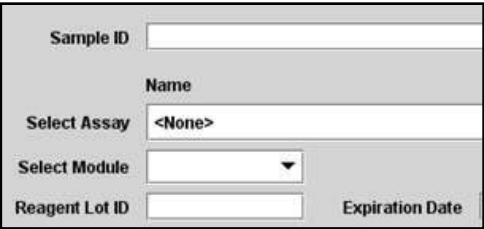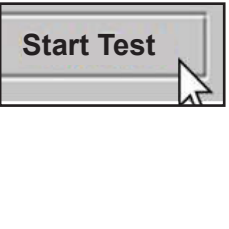- 5 Fare clic su Crea analisi (Create Test). 
- 6 Eseguire la scansione del codice a barre della cartuccia. 
- 7 Digitare o eseguire la scansione dell'ID campione (Sample ID). 
- 8 Fare clic su Avvia analisi (Start Test). 

- 9 Caricare la cartuccia nel modulo identificato dalla spia verde lampeggiante. Chiudere lo sportello del modulo finché non si blocca e la spia verde smette di lampeggiare. 
- 10 Fare clic sull'icona Visualizza risultati (View Results). Fare clic su Visualizza analisi (View Test) nella parte inferiore dello schermo. Selezionare l'ID campione (Sample ID) corretto. 
- 11 Smaltire la cartuccia usata. 

Risultati generati
< 60 minuti

