



# Prélèvement d'échantillon par écouvillonnage nasal


1 Ouvrez l'emballage qui contient l'écouvillon et le tube de milieu de transport. Mettez le tube de côté avant de prélever l'échantillon.

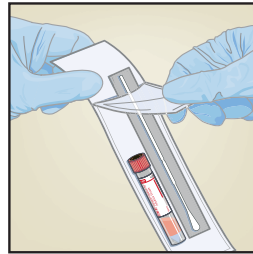

2 Ouvrez l'emballage et sortez l'écouvillon, en prenant soin de ne pas mettre son extrémité en contact avec une surface.

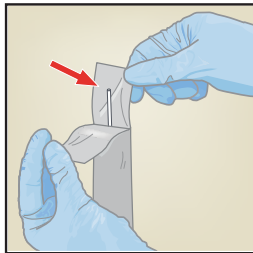

3 Tenez l'écouvillon dans votre main, en pinçant au milieu de la tige de l'écouvillon sur la ligne de cassure.

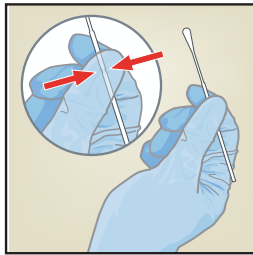


4 Tournez l'écouvillon contre la paroi interne de la narine pendant 3 secondes en exerçant une pression avec le doigt sur l'extérieur de la narine.




N'insérez pas les écouvillons de plus de 1 à 1,5 cm.


5 Répétez l'étape 4 dans l'autre narine avec le même écouvillon. Pour éviter de contaminer l'échantillon, ne mettez pas l'extrémité de l'écouvillon en contact avec quoi que ce soit après avoir prélevé l'échantillon.

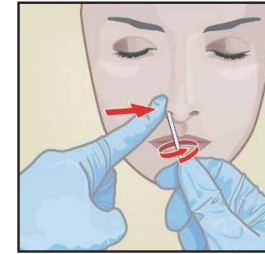

6 Retirez le bouchon du tube. Insérez l'écouvillon dans le milieu de transport.

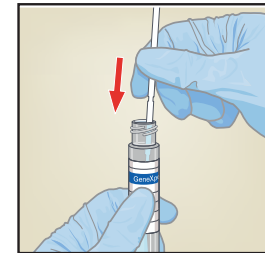

7 Cassez la tige de l'écouvillon contre la paroi du tube au niveau de la ligne de cassure.

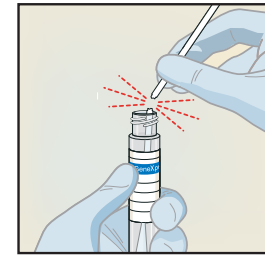

8 Évitez d'éclabousser le contenu sur la peau. Lavez-vous au savon et à l'eau en cas d'exposition.

