

# Preparazione della cartuccia Xpert® Ebola *con campione prelevato su tampone buccale*


Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della scheda di sicurezza (SDS), visitare il sito [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)


Assistenza Tecnica di Cepheid  
Ufficio USA  
+1 (888) 838-3222, opzione 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)

Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)

Sfregare la punta del tampone\* contro l'interno della guancia con movimenti circolari decisi. Sfregare entrambe le guance, se possibile, utilizzando l'intera testa del tampone.

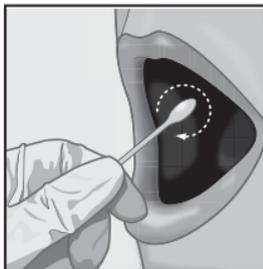

Allineare la scanalatura sul tampone con il bordo del flacone di reagente per il campione e spezzare il tampone piegandolo di lato. Usare della garza per evitare schizzi.

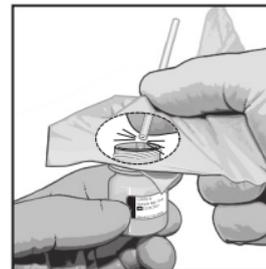

  
**Cepheid®**  
A better way.

1 Procurarsi una cartuccia Xpert Ebola e un campione raccolto ed etichettato nel modo idoneo.



2 Con il coperchio del flacone di reagente per il campione chiuso, miscelare il campione vortexandolo per 10 secondi.



3 Lasciare in incubazione il campione a temperatura ambiente per 20 minuti.



4 Aprire la cartuccia.



5 Con la pipetta fornita, aspirare 1 mL di campione trattato con il reagente per il campione.



6 Espellere il contenuto della pipetta nella camera per il campione.



7 Chiudere il coperchio della cartuccia Xpert.



8 Avviare l'analisi entro 30 minuti.

# Preparazione della cartuccia Xpert® Ebola con campione prelevato mediante puntura del dito

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni, fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della scheda di sicurezza (SDS), visitare il sito [www.cepheid.com](http://www.cepheid.com) o [www.cepheidinternational.com](http://www.cepheidinternational.com)


Assistenza Tecnica di Cepheid

Ufficio USA  
+1 (888) 838-3222, opzione 2  
[techsupport@cepheid.com](mailto:techsupport@cepheid.com)


Europa  
+33 563 82 53 19  
[support@cepheideurope.com](mailto:support@cepheideurope.com)



Lasciare che almeno 2/3 della testa del tampone\* assorba sangue. Trasferire immediatamente il tampone nel flacone di reagente per il campione.

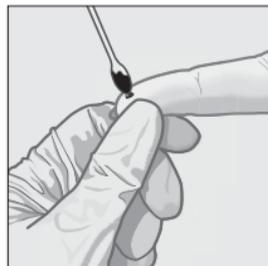

Allineare la scanalatura sul tampone con il bordo del flacone di reagente per il campione e spezzare il tampone piegandolo di lato. Usare della garza per evitare schizzi.

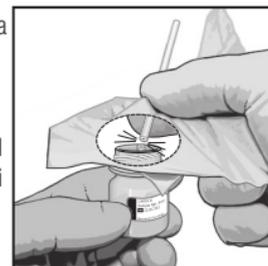

1 Procurarsi una cartuccia Xpert Ebola e un campione raccolto ed etichettato nel modo idoneo.



2 Con il coperchio del flacone di reagente per il campione chiuso, miscelare il campione vortexandolo per 10 secondi.




3 Lasciare in incubazione il campione a temperatura ambiente per 20 minuti.



4 Aprire la cartuccia.



5 Con la pipetta fornita, aspirare 1 mL di campione trattato con il reagente per il campione.

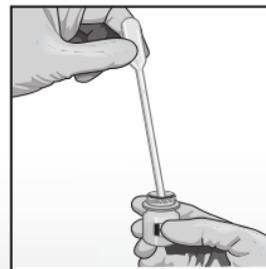

6 Espellere il contenuto della pipetta nella camera per il campione.



7 Chiudere il coperchio della cartuccia Xpert.



8 Avviare l'analisi entro 30 minuti.