


Preparação do cartucho Xpert® HPV v2

Consulte as instruções de utilização para obter instruções detalhadas, precauções e advertências.

1

Obtenha uma amostra de teste devidamente colhida e rotulada.

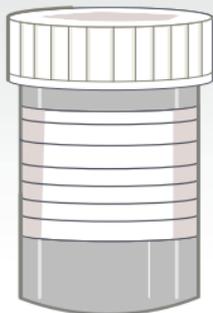


2

Obtenha um cartucho Xpert HPV v2 e uma pipeta de transferência (fornecida). A linha na pipeta indica um volume de enchimento de 1 ml. Rotule o cartucho com a identificação da amostra.



3

Inspeção o cartucho do teste para verificar se existem danos. Não utilize se estiver danificado. Abra a tampa do cartucho.

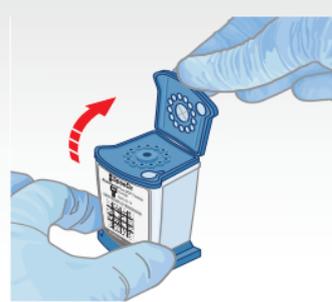

4

Misture suavemente a amostra invertendo o respetivo frasco 8 a 10 vezes ou agitando continuamente no agitador vórtex, a meia velocidade, durante 5 segundos.



5

Desembrulhe a pipeta de transferência. Abra a tampa do frasco da amostra, comprima o bolbo da pipeta de transferência, introduza-a no frasco e solte o bolbo para encher a pipeta de transferência até à linha de 1 ml. Assegure-se de que a pipeta é enchida sem a presença de bolhas de ar.



6

Esvazie o conteúdo da pipeta na câmara de amostra do cartucho. Evite introduzir muco em excesso no cartucho.



7

Feche a tampa do cartucho e inicie o teste no período indicado nas instruções de utilização.

