


# Przygotowanie kartridża Xpert® HPV v2

Szczegółowe instrukcje, środki ostrożności i ostrzeżenia zawiera instrukcja użycia.


1

Przygotować jedną odpowiednio pobraną i oznaczoną próbkę do testu.

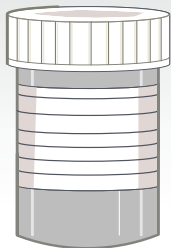


2

Przygotować jeden kartridż Xpert HPV v2 i pipetę transferową (dostarczoną). Linia na pipecie wskazuje objętość napełnienia równą 1 ml. Oznaczyć kartridż identyfikatorem próbki.

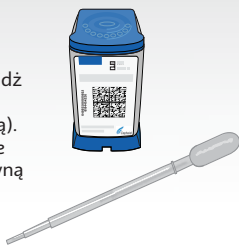


3

Sprawdzić kartridż testu pod kątem uszkodzeń. W razie zaobserwowania uszkodzenia nie używać kartridża. Otworzyć wieczko kartridża.

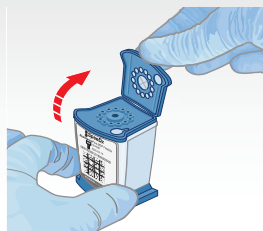

4

Wymieszać próbkę, delikatnie odwracając fiolkę z próbką od 8 do 10 razy lub krótko mieszając na wytrząsarce typu vortex przy połowie prędkości w trybie ciągłym przez 5 sekund.

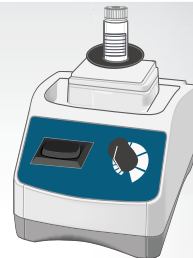


5

Rozpakować pipetę transferową. Otworzyć zatyczkę fiolki z próbką, ścisnąć bańkę ssącą pipety transferowej, włożyć pipetę do fiolki i zwolnić bańkę, aby napełnić pipetę transferową do linii 1 ml. Upewnić się, że pipeta jest napełniona i że nie zawiera żadnych pęcherzyków powietrza.



6

Przenieść zawartość pipety do komory na próbkę kartridża. Nie dopuścić do dodania nadmiernej ilości śluzu do kartridża.

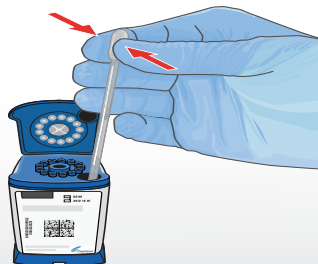

7

Zamknąć wieczko kartridża i rozpocząć test w czasie określonym w instrukcji użycia.

