

Preparazione della cartuccia Xpert® Bladder Cancer

descrizione di un campione di urina


Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della SDS, consultare il sito:
www.cepheid.com o
www.cepheidinternational.com

Assistenza Tecnica di Cepheid
Ufficio USA
+1 (888) 838-3222
techsupport@cepheid.com
Ufficio europeo
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com



1 Ottenere un campione di urina prelevato nel modo corretto e debitamente etichettato.

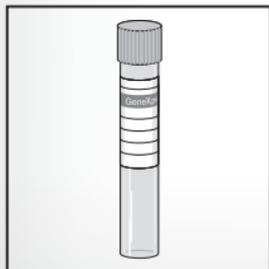


2 Procurarsi una cartuccia Xpert Bladder Cancer e una pipetta di trasferimento (fornita in dotazione).




3 Aprire il coperchio della cartuccia Xpert.



4 Capovolgere delicatamente la provetta di trasporto per 3 volte per miscelare.

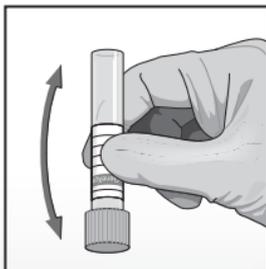

5 Riempire la pipetta di trasferimento con il campione, fino alla tacca di 4 mL.

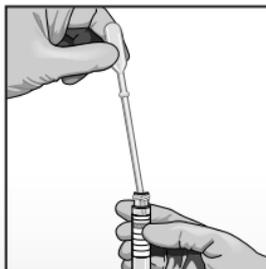


6 Espellere il contenuto della pipetta nella camera riservata al campione.



7 Chiudere il coperchio della cartuccia Xpert.



8 Introdurre la cartuccia e avviare il saggio.

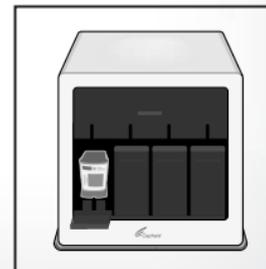

Preparazione della cartuccia Xpert® Bladder Cancer descrizione di un campione di urina nel bicchiere primario di raccolta

Per istruzioni dettagliate, avvertenze e precauzioni fare riferimento al foglietto illustrativo.

Per una copia della SDS, consultare il sito:
www.cepheid.com o
www.cepheidinternational.com


Assistenza Tecnica di Cepheid
Ufficio USA
+1 (888) 838-3222
techsupport@cepheid.com
Ufficio europeo
+33 563 82 53 19
support@cepheideurope.com




1 Ottenere un campione di urina di almeno 4,5 mL nel bicchiere primario di raccolta.




2 Procurarsi un kit di reagente per il trasporto di urina Xpert.

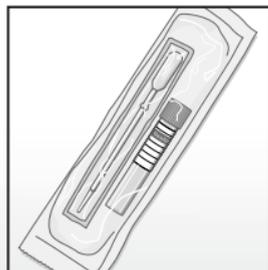

3 Capovolgere il bicchiere per tre volte per miscelare l'urina.

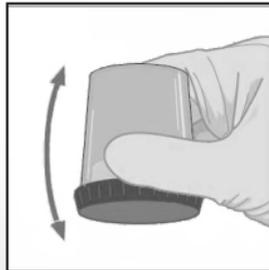


4 Usare la pipetta di trasferimento monouso fornita nel kit di reagente per il trasporto di urina Xpert nel sacchetto con la provetta. NOTE Non usare la pipetta del kit del saggio.

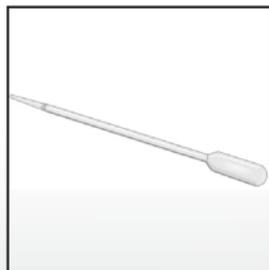


5 Introdurre la pipetta di trasferimento nel fondo del bicchiere contenente l'urina.



6 Trasferire circa 4,5 mL di urina in modo che il volume raggiunga la linea nera sull'etichetta della provetta.

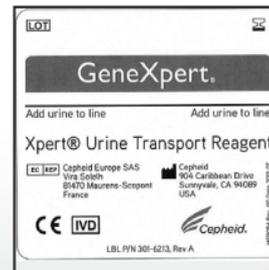

7 Rimettere il tappo sulla provetta con reagente per il trasporto di urina Xpert e serrarlo saldamente. Etichettarla correttamente e trasferirla nell'area di preparazione della cartuccia GeneXpert.

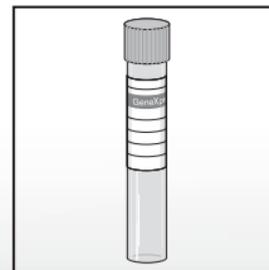

8 Per ulteriori istruzioni vedere il retro di questa scheda.

