



# Prélèvement d'échantillon d'urine (premier jet) pour les tests Xpert CT/NG et Xpert TV

1 Demandez au patient de fournir un prélèvement d'urine de premier jet (20 à 50 ml) dans un flacon de prélèvement d'urine exempt de tout conservateur.

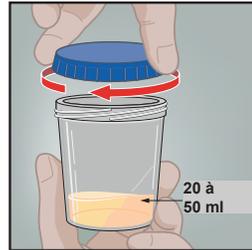


Remarque : Avant le prélèvement d'un échantillon d'urine, le patient ne doit pas avoir uriné pendant au moins 1 heure et ne doit pas avoir nettoyé la région génitale (en ce qui concerne les patientes) ou l'extrémité du pénis (en ce qui concerne les patients).

2 Le kit de prélèvement d'échantillon d'urine Xpert® contient

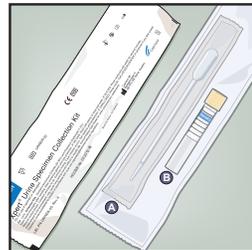


- A Pipette de transfert jetable de grande taille
- B Tube de réactif de transport d'urine (bouchon jaune)


3 Ouvrez l'emballage d'une pipette de transfert jetable fournie dans le kit.

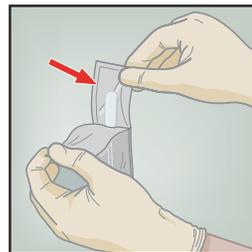


4 Retirez le bouchon jaune du tube de transport.

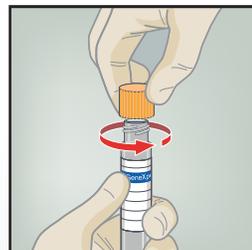


5 Mélangez bien l'échantillon. Transférez environ 7 ml d'urine dans le tube de transport en utilisant la pipette de transfert jetable. Notez la ligne de pointillés noirs sur l'étiquette du tube de transport et remplissez jusqu'à la ligne pour obtenir le volume de remplissage correct.

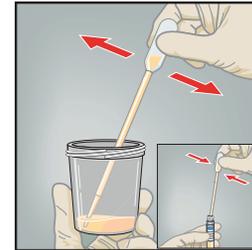

6 Remplacez le bouchon jaune sur le tube de transport et serrez bien.

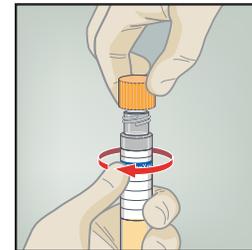

7 Retournez 3-4 fois le tube de transport pour assurer un bon mélange de l'échantillon et du réactif.

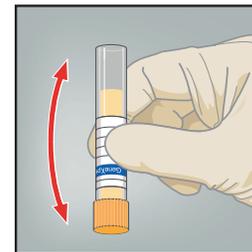

8 Étiquetez le tube de transport avec les informations d'identification de l'échantillon, notamment la date du prélèvement, comme requis. Veillez à ne pas masquer la ligne de remplissage de pointillés noirs du tube de réactif de transport d'urine Xpert.

