


Prelievo del campione di urina (primo getto) per i saggi Xpert CT/NG e Xpert TV

1

Chiedere al paziente di fornire urina di primo getto (20-50 ml) in un bicchiere per prelievo di urina privo di conservanti.


Nota – Prima della raccolta del campione di urina, il paziente non deve aver urinato per almeno 1 ora e non deve aver pulito l'area genitale (pazienti donne) o la punta del pene (pazienti maschi).

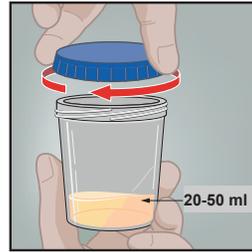

2

Il kit di prelievo del campione di urina Xpert® contiene

- A Pipetta di trasferimento monouso grande
- B Provetta con reagente per trasporto di urina (tappo giallo)

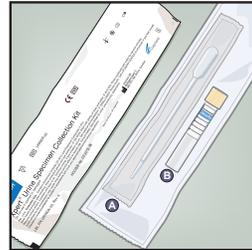


3

Aprire la confezione di una pipetta di trasferimento monouso fornita nel kit.




4

Togliere il tappo giallo dalla provetta di trasporto.

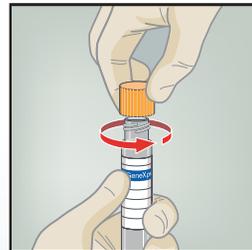


5

Miscelare bene il campione. Trasferire circa 7 ml di urina nella provetta di trasporto, utilizzando la pipetta di trasferimento monouso. Osservare la linea nera tratteggiata sull'etichetta della provetta di trasporto e ottenere il volume di riempimento corretto riempiendo fino alla linea.

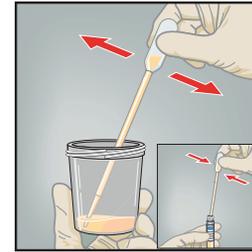


6

Richiudere con il tappo giallo la provetta di trasporto e serrarlo saldamente.

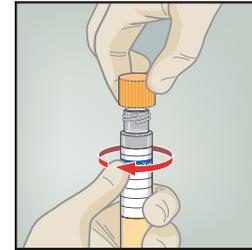

7

Capovolgere la provetta di trasporto 3-4 volte per garantire che il campione e il reagente siano ben miscelati.

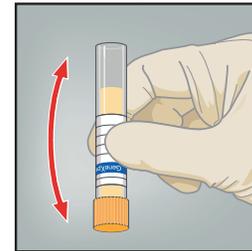

8

Applicare sulla provetta di trasporto l'etichetta con le informazioni di identificazione del campione, compresa la data del prelievo, come necessario. Non oscurare la linea nera tratteggiata di riempimento sulla provetta con reagente per il trasporto dell'urina Xpert.

